

Temperatur Prober

Måleteknik

EXACON prober er baseret på 4000 serie termistor og er tilrådighed med et stort antal forskellige connectorer som passer til størstedelen af alle moderne patientmonitører på markedet.

Anvendte materialer

Proberne er forsynede med medicinske siliconkabler. Sensorspidsen er fremstillet af højtemperatur plastmaterialer og rustfrit stål. Proberne er uden LATEX og PVC.

Rengøring

Sensoren borttages forsigtigt fra målestedet. Fjern eventuelle taperester med rensbenzin. Herefter kan den rengøres med en let sæbeopløsning. Anvend et blødt stykke stof eller en blød børste.

Jack stikker tåler ikke vand - aftør det med et rent stykke stof, gerne med lidt rensbenzin. Øvrige stik rengøres som nedenfor.

Desinficering

Desinficer den rengjorte probe med desiinfektions middel som f.eks.:


- A. Rodalon™, Cidex™.
- B. 1 - 2,5% Formaldehydopløsning.
- C. 70% Alkohol, 0,5% Chlorexidine, 29,5% H2O

Sterilisering

For autoklaverbare typer ved 121°C i 20 min cyklus. Kemisk sterilisering med ethylenoxyd.

Damp sterilisering

En meget vigtig fortrin for EXACON prober er deres evne til at accepterer autoklavering, hvilket eliminerer risikoen for krydsinfektion. Herudover er det den blideste metode for miljøet, da det eneste spild fra denne process er: STERILT VAND!

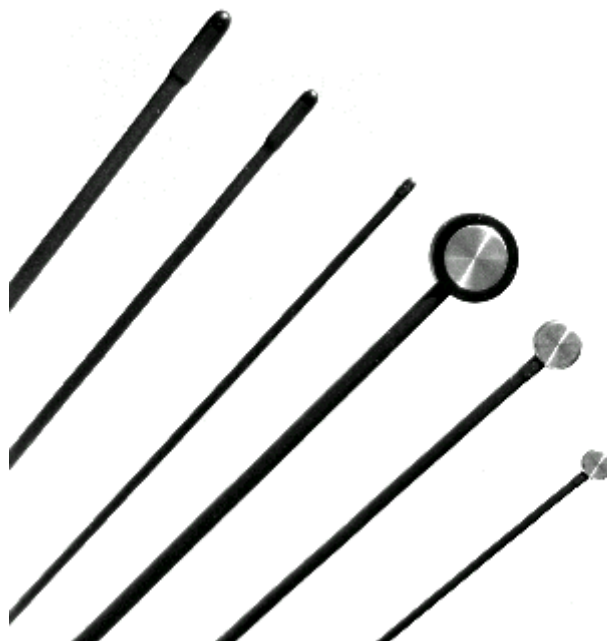

Connector type "JK"

6,25 mm Jack Plug for probes accepting ordinary disinfectants and Gas Sterilisation.



Connector type "A"

A 6,25 mm Jack Plug for probes accepting ordinary disinfectants, Gas and Steam Sterilisation.



Connector type "HP"

Hewlett Packard Monitors (Agilent)
2 pin Plug for probes accepting ordinary disinfectants, Gas and Steam Sterilisation.



Connector type "SA"

SA Siemens Monitors SC6000/9000
7 pin Plug for probes accepting ordinary disinfectants, Gas and Steam Sterilisation.

TGm PN	OEM PN	Temperatur føler	Stik	Længde
1-05-012	D-OS2-HP-15	Oesophagus Ø 2 mm	HP	1,50
1-05-116	D-OS2-HP	Oesophagus Ø 2 mm	HP	2,75
1-05-013	D-OS2-HP-45	Oesophagus Ø 2 mm	HP	4,50
1-05-014	D-OS2-JK-15	Oesophagus Ø 2 mm	Jack	1,50
1-05-117	D-OS2-JK	Oesophagus Ø 2 mm	Jack	2,75
1-05-015	D-OS2-JK-45	Oesophagus Ø 2 mm	Jack	4,50
1-05-010	D-OS2-A-15	Oesophagus Ø 2 mm	Jack - Autoclaveable	1,50
1-05-092	D-OS2-A	Oesophagus Ø 2 mm	Jack - Autoclaveable	2,75
1-05-011	D-OS2-A-45	Oesophagus Ø 2 mm	Jack - Autoclaveable	4,50
1-05-016	D-OS2-SA-15	Oesophagus Ø 2 mm	Siemens	1,50
1-05-123	D-OS2-SA	Oesophagus Ø 2 mm	Siemens	2,75
1-05-017	D-OS2-SA-45	Oesophagus Ø 2 mm	Siemens	4,50
1-05-022	D-OS3-HP-15	Oesophagus Ø 3 mm	HP	1,50
1-05-114	D-OS3-HP	Oesophagus Ø 3 mm	HP	2,75
1-05-143	D-OS3-HP-45	Oesophagus Ø 3 mm	HP	4,50
1-05-023	D-OS3-JK-15	Oesophagus Ø 3 mm	Jack	1,50
1-05-115	D-OS3-JK	Oesophagus Ø 3 mm	Jack	2,75
1-05-024	D-OS3-JK-45	Oesophagus Ø 3 mm	Jack	4,50
1-05-020	D-OS3-A-15	Oesophagus Ø 3 mm	Jack - Autoclaveable	1,50
1-05-094	D-OS3-A	Oesophagus Ø 3 mm	Jack - Autoclaveable	2,75
1-05-021	D-OS3-A-45	Oesophagus Ø 3 mm	Jack - Autoclaveable	4,50
1-05-025	D-OS3-SA-15	Oesophagus Ø 3 mm	Siemens	1,50
1-05-128	D-OS3-SA	Oesophagus Ø 3 mm	Siemens	2,75
1-05-026	D-OS3-SA-45	Oesophagus Ø 3 mm	Siemens	4,50
1-05-032	D-OS4-HP-15	Oesophagus Ø 4 mm	HP	1,50
1-05-112	D-OS4-HP	Oesophagus Ø 4 mm	HP	2,75
1-05-033	D-OS4-HP-45	Oesophagus Ø 4 mm	HP	4,50
1-05-034	D-OS4-JK-15	Oesophagus Ø 4 mm	Jack	1,50
1-05-113	D-OS4-JK	Oesophagus Ø 4 mm	Jack	2,75
1-05-035	D-OS4-JK-45	Oesophagus Ø 4 mm	Jack	4,50
1-05-030	D-OS4-A-15	Oesophagus Ø 4 mm	Jack - Autoclaveable	1,50
1-05-090	D-OS4-A	Oesophagus Ø 4 mm	Jack - Autoclaveable	2,75
1-05-031	D-OS4-A-45	Oesophagus Ø 4 mm	Jack - Autoclaveable	4,50
1-05-036	D-OS4-SA-15	Oesophagus Ø 4 mm	Siemens	1,50
1-05-122	D-OS4-SA	Oesophagus Ø 4 mm	Siemens	2,75
1-05-037	D-OS4-SA-45	Oesophagus Ø 4 mm	Siemens	4,50
1-05-165	D-RB4-HP-15	Rectalføler m. krave Ø 4 mm	HP	1,50
1-05-100	D-RB4-HP	Rectalføler m. krave Ø 4 mm	HP	2,75
1-05-164	D-RB4-HP-45	Rectalføler m. krave Ø 4 mm	HP	4,50
1-05-163	D-RB4-JK-15	Rectalføler m. krave Ø 4 mm	Jack	1,50
1-05-101	D-RB4-JK	Rectalføler m. krave Ø 4 mm	Jack	2,75
1-05-162	D-RB4-JK-45	Rectalføler m. krave Ø 4 mm	Jack	4,50
1-05-161	D-RB4-A-15	Rectalføler m. krave Ø 4 mm	Jack - Autoclaveable	1,50
1-05-135	D-RB4-A	Rectalføler m. krave Ø 4 mm	Jack - Autoclaveable	2,75
1-05-160	D-RB4-A-45	Rectalføler m. krave Ø 4 mm	Jack - Autoclaveable	4,50
1-05-142	D-RB4-SA-15	Rectalføler m. krave Ø 4 mm	Siemens	1,50
1-05-127	D-RB4-SA	Rectalføler m. krave Ø 4 mm	Siemens	2,75
1-05-166	D-RB4-SA-45	Rectalføler m. krave Ø 4 mm	Siemens	4,50
1-05-155	D-RA5-HP-15	Rectalføler m. krave Ø 5 mm	HP	1,50
1-05-102	D-RA5-HP	Rectalføler m. krave Ø 5 mm	HP	2,75
1-05-154	D-RA5-HP-45	Rectalføler m. krave Ø 5 mm	HP	4,50
1-05-153	D-RA5-JK-15	Rectalføler m. krave Ø 5 mm	Jack	1,50
1-05-103	D-RA5-JK	Rectalføler m. krave Ø 5 mm	Jack	2,75
1-05-152	D-RA5-JK-45	Rectalføler m. krave Ø 5 mm	Jack	4,50
1-05-151	D-RA5-A-15	Rectalføler m. krave Ø 5 mm	Jack - Autoclaveable	1,50
1-05-134	D-RA5-A	Rectalføler m. krave Ø 5 mm	Jack - Autoclaveable	2,75
1-05-150	D-RA5-A-45	Rectalføler m. krave Ø 5 mm	Jack - Autoclaveable	4,50
1-05-157	D-RA5-SA-15	Rectalføler m. krave Ø 5 mm	Siemens	1,50
1-05-132	D-RA5-SA	Rectalføler m. krave Ø 5 mm	Siemens	2,75
1-05-156	D-RA5-SA-45	Rectalføler m. krave Ø 5 mm	Siemens	4,50



TGm PN	OEM PN	Temperatur føler	Stik	Længde
1-05-070	D-RB2-HP-15	Rectalføler Ø 2 mm	HP	1,50
1-05-077	D-RB2-HP	Rectalføler Ø 2 mm	HP	2,75
1-05-071	D-RB2-HP-45	Rectalføler Ø 2 mm	HP	4,50
1-05-072	D-RB2-JK-15	Rectalføler Ø 2 mm	Jack	1,50
1-05-078	D-RB2-JK	Rectalføler Ø 2 mm	Jack	2,75
1-05-073	D-RB2-JK-45	Rectalføler Ø 2 mm	Jack	4,50
1-05-074	D-RB2-A-15	Rectalføler Ø 2 mm	Jack - Autoclaveable	1,50
1-05-076	D-RB2-A	Rectalføler Ø 2 mm	Jack - Autoclaveable	2,75
1-05-075	D-RB2-A-45	Rectalføler Ø 2 mm	Jack - Autoclaveable	4,50
1-05-189	D-RB2-SA-15	Rectalføler Ø 2 mm	Siemens	1,50
1-05-079	D-RB2-SA	Rectalføler Ø 2 mm	Siemens	2,75
1-05-188	D-RB2-SA-45	Rectalføler Ø 2 mm	Siemens	4,50
1-05-185	D-RB3-HP-15	Rectalføler Ø 3 mm	HP	1,50
1-05-099	D-RB3-HP	Rectalføler Ø 3 mm	HP	2,75
1-05-184	D-RB3-HP-45	Rectalføler Ø 3 mm	HP	4,50
1-05-183	D-RB3-JK-15	Rectalføler Ø 3 mm	Jack	1,50
1-05-137	D-RB3-JK	Rectalføler Ø 3 mm	Jack	2,75
1-05-182	D-RB3-JK-45	Rectalføler Ø 3 mm	Jack	4,50
1-05-181	D-RB3-A-15	Rectalføler Ø 3 mm	Jack - Autoclaveable	1,50
1-05-138	D-RB3-A	Rectalføler Ø 3 mm	Jack - Autoclaveable	2,75
1-05-180	D-RB3-A-45	Rectalføler Ø 3 mm	Jack - Autoclaveable	4,50
1-05-187	D-RB3-SA-15	Rectalføler Ø 3 mm	Siemens	1,50
1-05-130	D-RB3-SA	Rectalføler Ø 3 mm	Siemens	2,75
1-05-186	D-RB3-SA-45	Rectalføler Ø 3 mm	Siemens	4,50
1-05-176	D-RA4-HP-15	Rectalføler Ø 4 mm	HP	1,50
1-05-104	D-RA4-HP	Rectalføler Ø 4 mm	HP	2,75
1-05-175	D-RA4-HP-45	Rectalføler Ø 4 mm	HP	4,50
1-05-174	D-RA4-JK-15	Rectalføler Ø 4 mm	Jack	1,50
1-05-105	D-RA4-JK	Rectalføler Ø 4 mm	Jack	2,75
1-05-173	D-RA4-JK-45	Rectalføler Ø 4 mm	Jack	4,50
1-05-172	D-RA4-A-15	Rectalføler Ø 4 mm	Jack - Autoclaveable	1,50
1-05-088	D-RA4-A	Rectalføler Ø 4 mm	Jack - Autoclaveable	2,75
1-05-171	D-RA4-A-45	Rectalføler Ø 4 mm	Jack - Autoclaveable	4,50
1-05-178	D-RA4-SA-15	Rectalføler Ø 4 mm	Siemens	1,50
1-05-129	D-RA4-SA	Rectalføler Ø 4 mm	Siemens	2,75
1-05-177	D-RA4-SA-45	Rectalføler Ø 4 mm	Siemens	4,50
1-05-402	D-TM1-HP-15	Tympanic	HP	1,50
1-05-401	D-TM1-HP	Tympanic	HP	2,75
1-05-403	D-TM1-HP-45	Tympanic	HP	4,50
1-05-408	D-TM1-JK-15	Tympanic	Jack	1,50
1-05-407	D-TM1-JK	Tympanic	Jack	2,75
1-05-409	D-TM1-JK-45	Tympanic	Jack	4,50
1-05-411	D-TM1-A-15	Tympanic	Jack - Autoclaveable	1,50
1-05-410	D-TM1-A	Tympanic	Jack - Autoclaveable	2,75
1-05-412	D-TM1-A-45	Tympanic	Jack - Autoclaveable	4,50
1-05-405	D-TM1-SA-15	Tympanic	Siemens	1,50
1-05-404	D-TM1-SA	Tympanic	Siemens	2,75
1-05-406	D-TM1-SA-45	Tympanic	Siemens	4,50
1-04-422	D-F1345-HP-15	Catheter 1,3 x 450 mm	HP	1,50
1-04-421	D-F1345-HP	Catheter 1,3 x 450 mm	HP	2,75
1-04-423	D-F1345-HP-45	Catheter 1,3 x 450 mm	HP	4,50
1-04-425	D-F1345-JK-15	Catheter 1,3 x 450 mm	Jack	1,50
1-04-424	D-F1345-JK	Catheter 1,3 x 450 mm	Jack	2,75
1-04-426	D-F1345-JK-45	Catheter 1,3 x 450 mm	Jack	4,50
1-04-428	D-F1345-A-15	Catheter 1,3 x 450 mm	Jack - Autoclaveable	1,50
1-04-427	D-F1345-A	Catheter 1,3 x 450 mm	Jack - Autoclaveable	2,75
1-04-429	D-F1345-A-45	Catheter 1,3 x 450 mm	Jack - Autoclaveable	4,50
1-04-431	D-F1345-SA-15	Catheter 1,3 x 450 mm	Siemens	1,50
1-04-430	D-F1345-SA	Catheter 1,3 x 450 mm	Siemens	2,75
1-04-432	D-F1345-SA-45	Catheter 1,3 x 450 mm	Siemens	4,50



TGm PN	OEM PN	Temperatur føler	Stik	Længde
1-05-042	D-S06-HP-15	Skin Ø 6 mm	HP	1,50
1-05-110	D-S06-HP	Skin Ø 6 mm	HP	2,75
1-05-043	D-S06-HP-45	Skin Ø 6 mm	HP	4,50
1-05-044	D-S06-JK-15	Skin Ø 6 mm	Jack	1,50
1-05-111	D-S06-JK	Skin Ø 6 mm	Jack	2,75
1-05-045	D-S06-JK-45	Skin Ø 6 mm	Jack	4,50
1-05-040	D-S06-A-15	Skin Ø 6 mm	Jack - Autoclaveable	1,50
1-05-139	D-S06-A	Skin Ø 6 mm	Jack - Autoclaveable	2,75
1-05-041	D-S06-A-45	Skin Ø 6 mm	Jack - Autoclaveable	4,50
1-05-046	D-S06-SA-15	Skin Ø 6 mm	Siemens	1,50
1-05-120	D-S06-SA	Skin Ø 6 mm	Siemens	2,75
1-05-047	D-S06-SA-45	Skin Ø 6 mm	Siemens	4,50
1-05-052	D-S10-HP-15	Skin Ø 10 mm	HP	1,50
1-05-106	D-S10-HP	Skin Ø 10 mm	HP	2,75
1-05-053	D-S10-HP-45	Skin Ø 10 mm	HP	4,50
1-05-054	D-S10-JK-15	Skin Ø 10 mm	Jack	1,50
1-05-107	D-S10-JK	Skin Ø 10 mm	Jack	2,75
1-05-140	D-S10-JK-45	Skin Ø 10 mm	Jack	4,50
1-05-050	D-S10-A-15	Skin Ø 10 mm	Jack - Autoclaveable	1,50
1-05-097	D-S10-A	Skin Ø 10 mm	Jack - Autoclaveable	2,75
1-05-051	D-S10-A-45	Skin Ø 10 mm	Jack - Autoclaveable	4,50
1-05-055	D-S10-SA-15	Skin Ø 10 mm	Siemens	1,50
1-05-124	D-S10-SA	Skin Ø 10 mm	Siemens	2,75
1-05-056	D-S10-SA-45	Skin Ø 10 mm	Siemens	4,50
1-05-062	D-S18-HP-15	Skin Ø 18 mm	HP	1,50
1-05-108	D-S18-HP	Skin Ø 18 mm	HP	2,75
1-05-141	D-S18-HP-45	Skin Ø 18 mm	HP	4,50
1-05-063	D-S18-JK-15	Skin Ø 18 mm	Jack	1,50
1-05-109	D-S18-JK	Skin Ø 18 mm	Jack	2,75
1-05-064	D-S18-JK-45	Skin Ø 18 mm	Jack	4,50
1-05-060	D-S18-A-15	Skin Ø 18 mm	Jack - Autoclaveable	1,50
1-05-095	D-S18-A	Skin Ø 18 mm	Jack - Autoclaveable	2,75
1-05-061	D-S18-A-45	Skin Ø 18 mm	Jack - Autoclaveable	4,50
1-05-125	D-S18-SA-15	Skin Ø 18 mm	Siemens	1,50
1-05-121	D-S18-SA	Skin Ø 18 mm	Siemens	2,75
1-05-065	D-S18-SA-45	Skin Ø 18 mm	Siemens	4,50
1-04-442	D-N1205-HP-15	Neddle 1,2 x 50 mm	HP	1,50
1-04-441	D-N1205-HP	Neddle 1,2 x 50 mm	HP	2,75
1-04-443	D-N1205-HP-45	Neddle 1,2 x 50 mm	HP	4,50
1-04-445	D-N1205-JK-15	Neddle 1,2 x 50 mm	Jack	1,50
1-04-444	D-N1205-JK	Neddle 1,2 x 50 mm	Jack	2,75
1-04-446	D-N1205-JK-45	Neddle 1,2 x 50 mm	Jack	4,50
1-04-448	D-N1205-A-15	Neddle 1,2 x 50 mm	Jack - Autoclaveable	1,50
1-04-447	D-N1205-A	Neddle 1,2 x 50 mm	Jack - Autoclaveable	2,75
1-04-449	D-N1205-A-45	Neddle 1,2 x 50 mm	Jack - Autoclaveable	4,50
1-04-451	D-N1205-SA-15	Neddle 1,2 x 50 mm	Siemens	1,50
1-04-450	D-N1205-SA	Neddle 1,2 x 50 mm	Siemens	2,75
1-04-452	D-N1205-SA-45	Neddle 1,2 x 50 mm	Siemens	4,50
1-04-562	D-N1210-HP-15	Neddle 1,2 x 100 mm	HP	1,50
1-04-561	D-N1210-HP	Neddle 1,2 x 100 mm	HP	2,75
1-04-563	D-N1210-HP-45	Neddle 1,2 x 100 mm	HP	4,50
1-04-565	D-N1210-JK-15	Neddle 1,2 x 100 mm	Jack	1,50
1-04-564	D-N1210-JK	Neddle 1,2 x 100 mm	Jack	2,75
1-04-566	D-N1210-JK-45	Neddle 1,2 x 100 mm	Jack	4,50
1-04-568	D-N1210-A-15	Neddle 1,2 x 100 mm	Jack - Autoclaveable	1,50
1-04-567	D-N1210-A	Neddle 1,2 x 100 mm	Jack - Autoclaveable	2,75
1-04-569	D-N1210-A-45	Neddle 1,2 x 100 mm	Jack - Autoclaveable	4,50
1-04-572	D-N1210-SA-15	Neddle 1,2 x 100 mm	Siemens	1,50
1-04-571	D-N1210-SA	Neddle 1,2 x 100 mm	Siemens	2,75
1-04-573	D-N1210-SA-45	Neddle 1,2 x 100 mm	Siemens	4,50

